



Apósito Transparente Tegaderm[®] HP

■ Apósito Transparente de Alta Adherencia

CARACTERÍSTICAS

Apósito estéril adhesivo, desarrollado para reducir los cambios de apósitos no programados en situaciones complejas.

Se caracteriza por tener mayor fuerza de adhesión que el apósito Tegaderm[®] Estándar, lo que permite una adherencia más prolongada y segura en zonas anatómicas complejas o en pacientes sudorosos o febriles.

VENTAJAS

Su adhesivo hipoalergénico reforzado adhiere incluso en presencia de humedad.

Constituye una excelente barrera contra la contaminación viral y bacteriana y es impermeable a líquidos desde el exterior.

Su transparencia permite monitorizar eficientemente el sitio de punción.

Los apósitos transparentes Tegaderm[®] son seguros para el paciente, ya que son libres de látex y poseen un adhesivo hipoalergénico, para reducir así las posibilidades de reacciones alérgicas.

BENEFICIOS

El apósito 3M[™] Tegaderm[®] HP posee excelente desempeño en pacientes sudorosos o febriles, lo que lo convierte en un apósito versátil para diferentes tipos de pacientes.




Utilice Tegaderm HP en situaciones que requieran una excelente fuerza de adhesión.

- Utilice Tegaderm HP en situaciones que requieran una excelente fuerza de adhesión.
- Fijación de catéteres centrales o periféricos en:
 - Pacientes febriles y diaforéticos
 - Sitios de punción problemáticos, como por ejemplo la zona Yugular.
- Heridas cutáneas con drenaje escaso a moderado:
 - Úlceras por presión de etapas I.
 - Abrusiones y peladuras superficiales.
 - Incisiones quirúrgicas.
 - Quemaduras superficiales.
- Protección de piel en riesgo, especialmente zona sacra ; Por ejemplo : incontinencia, fricción y roce.

Modo de Empleo

La aplicación del apósito es rápida y debe realizarse sobre piel limpia y seca.

Una vez abierto el envase se retira el apósito y luego se remueve la cubierta posterior protectora. Se aplica sobre el sitio de punción o herida, ejerciendo presión desde el centro hacia la periferia, se retira el marco del contorno, reforzando con presión la adherencia en la orilla, para obtener un sistema completamente hermético.

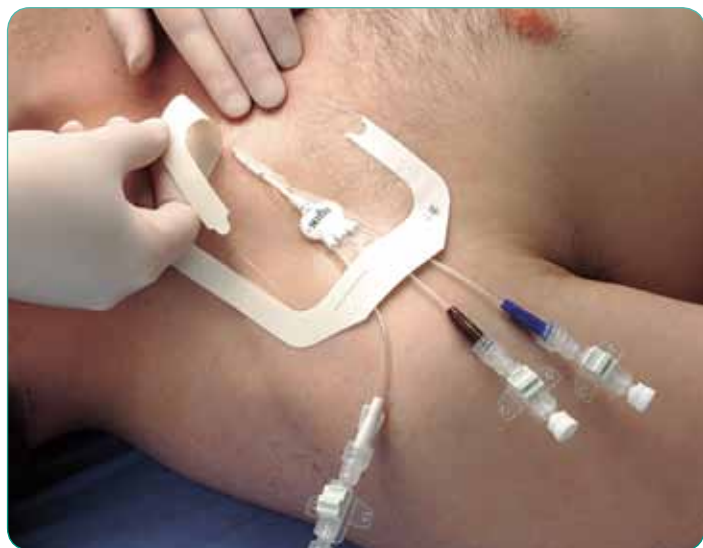

Código Producto	Descripción	Tamaño / Unidad	Unidad de Venta	Unidades de Productos
9534	3M Tegaderm HP	6 cm x 7 cm	Caja	100
9536	3M Tegaderm HP	10 cm x 12 cm	Caja	50



División Médica
3M Chile S.A.
Santa Isabel 1001. Providencia
Santiago

atencionconsumidor@mmm.com
Tel. 600 300 3636
www.3M.cl