


## FICHA TÉCNICA APÓSITO MIXTO DE CARBÓN ACTIVADO “ CARBOFLEX ”

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Apósito Mixto de Hidrofibra de Carboximetilcelulosa, Alginato y Carbón Activado
Nombre Comercial	CARBOFLEX
Descripción	CarboFlex es un apósito estéril no adhesivo, con una capa de contacto con la herida absorbente (Compuesta de Alginato e Hidrocoloide), capa central de carbón activado y una suave capa superior resistente al agua.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composición del Producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Película de Acrilato de Etilen Metilo que aíslan el carbón activado del exudado.</li> <li>• Capa absorbentes de fibra mixtas de hidrofibra de carboximetilcelulosa y alginato, para absorber exudado y controlar carga microbiana.</li> <li>• Capa de Carbón Activado, que controla el olor de heridas infectadas.</li> </ul>
Características y Acciones del Producto	<p><b>Medio Ambiente Húmedo:</b> favorece el desbridamiento autolítico y la promoción de tejido de granulación y epitelización.</p> <p><b>Controla Efectivamente el Mal Olor.</b></p> <p><b>Absorbe y controla el exudado.</b></p> <p><b>No adherente:</b> Permite que los cambios de apósito sean menos traumáticos.</p> <p><b>Suave y cómodo.</b></p>
Usos	<p>CarboFlex está indicado para el manejo del mal olor en heridas agudas y crónicas.</p> <p>Puede ser usado como apósito primario para heridas superficiales o en heridas más profundas como apósito secundario.</p> <p>CarboFlex puede ser usado en heridas de mal olor infectadas bajo supervisión médica junto con una terapia apropiada y frecuente monitoreo de la herida.</p>

<p>Recomendaciones de Uso</p>	<p>Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorar el lecho de la lesión (condiciones de la herida) y la piel circundante.</li> <li>• Limpiar el lecho de la lesión y la piel circundante con solución salina normal, sin utilizar soluciones antisépticas.</li> <li>• Remover la mayor cantidad de tejido necrótico posible antes de iniciar la terapia y/o aplicar Gel Hidrocoloide para desbridamiento autolítico.</li> <li>• Elegir un tamaño de apósito que sobrepase a lo menos 3 Cm., el tamaño de la lesión en el caso de heridas superficiales. En heridas profundas se puede colocar el apósito directo en el lecho de la herida como apósito primario y para heridas cavitadas, CarboFlex se puede colocar sobre un apósito o gel que rellene la herida actuando como apósito secundario.</li> <li>• Colocar la superficie fibrosa en la herida o sobre el apósito primario.</li> <li>• La capa absorbente que va al contacto con la herida, absorberá exudado y formará un suave gel.</li> <li>• Cambiar el apósito cuando esté clínicamente indicado; si el exudado alcanza la capa superior del apósito, o si el olor ya no es absorbido. CarboFlex puede estar en el lecho de la herida hasta por 3 días. Si la herida está infectada, deberá aumentar la frecuencia de cambio de CarboFlex.</li> <li>• Para remover CarboFlex, tomar una esquina del apósito y levántelo suavemente.</li> <li>• Precauciones de Almacenaje: Almacene a temperatura ambiente, evite refrigeración y de exponer al apósito a una alta humedad.</li> </ul>
<p>Soporte Científico</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Griffiths B, Jacques E, Jones S, Davies B, Bowler B, Bishop S. Determination of malodour reduction performance in various charcoal containing dressings. Data on file, ConvaTec.</li> <li>2. Walmsley R, Waring M. An investigation into the fluid handling characteristics of the wound contact layers of several odour absorbing dressings. Data on file, ConvaTec.</li> <li>3. Williams, C. Role of CarboFLEX in the Nursing Management of Wound Odor. British Journal of Nursing 2001 vol 10 no. 2.</li> </ol>
<p>Presentación</p>	<p>Carboflex : Apósito 10 x 10 cm. Caja de 10 unidades</p>

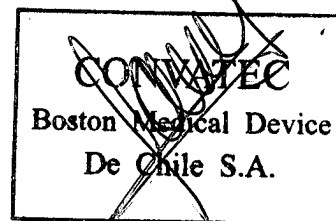

## FORMATO DE CALIFICACIÓN APÓSITO MIXTO DE CARBÓN ACTIVADO CARBOFLEX

( Calificación de 1 a 5 )    5= Muy bueno    4=Bueno    3=Regular    2=Deficiente    1= Malo

### PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

<b>Concepto Técnico</b>					
Capacidad de Absorción de Exudado.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Retención de Exudado dentro del apósito.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Control efectivo del olor.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Impermeabilidad de la capa externa.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de adaptación a la movilidad del paciente.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Soporte Científico de la Eficacia del Producto (Evidencia Clínica).	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio de Asesoría Profesional.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Recomendaría el uso del producto	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calificación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Observaciones:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Firma:					
Nombre institución donde se realiza la evaluación del producto :					
Fecha:					