

FICHA TECNICA BOLSAS DRENABLES SUR-FIT PLUS®

PRODUCTO	
Nombre	Bolsa Drenable
Nombre Comercial	Bolsa Drenable Sur-Fit Plus®
Descripción	Bolsa recolectora de fluidos abierta en su parte distal, protegida en su cara posterior por un panel de plástico protector. La bolsa está provista de un aro Sur-Fit Plus®.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composición del Producto	Bolsa Recolectora drenable elaborada en un plástico suave (Five Ply Film), cubierta en su parte anterior y posterior con un refuerzo en Polietileno y EMA. Está provista de un aro Sur-Fit Plus® con acople para placa stomahesive rígida, flexible y moldeable. Con ocho broches de contención.
Características y Acciones del Producto	<p>Protección de la Piel: La bolsa esta cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad e impide el contacto del plástico con la piel del paciente evitando así irritaciones de la piel. Mantiene la piel seca y protegida.</p> <p>Bolsa color piel: Hace que la bolsa sea más discreta y no permite la visualización de su contenido.</p> <p>Bolsa Elaborada en Plástico resistente a fugas: Evita que los gases salgan al exterior proporcionando así mayor Seguridad y comodidad al paciente.</p> <p>Ajuste perfecto: El aro Sur-Fit Plus® provisto de ocho broches de contención permite que se ajuste perfectamente al aro del mismo diámetro de las barreras Sur-Fit Plus® minimizando los riesgos de desacoples accidentales.</p> <p>Comodidad: Por ser una bolsa drenable le ofrece comodidad e higiene al paciente.</p>
Usos	Ostomías Digestivas: Ileostomías y Colostomías
Recomendaciones de Uso	<p>Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elegir la bolsa del mismo diámetro de la barrera protectora de piel Sur-Fit Plus® • Para acoplar la bolsa a la barrera, comenzar acoplando los aros por los bordes inferiores. Asegúrese que queden bien acoplados. • Deje la bolsa con una pequeña cantidad de aire antes de acoplarla a la barrera para que pueda bajar libremente el efluente. • Si la bolsa se perfora por alguna razón desecharla y usar una nueva. Promedio de duración 5 días (tener en cuenta las recomendaciones de lavado diario) • Colocar la pinza de cierre en la parte distal de la bolsa • Si se perfora por alguna razón la bolsa hay que desecharla
Presentaciones:	<p>Bolsas drenables</p> <p>Medidas: Diámetros de 70mm – 57mm – 45mm – 38mm – 32mm. Caja con 10 unidades c/u.</p>

FORMATO DE CALIFICACION BOLSAS DRENABLES SUR-FIT PLUS®

(Calificación de 1 a 5) 5=Muy bueno 4=Bueno 3=Regular 2=Deficiente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Sistema de acople a la barrera de piel (broches de contención)	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Protección de la Piel	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia a los Drenajes	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de la bolsa	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Reducción de la Frecuencia de Cambios de Dispositivo	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Control del olor	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Drenaje de la Bolsa	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Seguridad del Sistema de Cierre	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia de la Pinza de Cierre	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio Post-Venta: Asesoría educativa y Servicio al Cliente	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					