



FICHA TÉCNICA
BOLSAS DE UROSTOMÍA SUR-FIT PLUS®

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Bolsas de urostomía
Nombre Comercial	Bolsas de urostomía Sur-Fit Plus®
Descripción	Bolsa recolectora de fluidos líquidos provista de un aro Sur-Fit Plus® y un sistema de drenaje de válvula en su parte distal.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido ConvaTec Dominican Republic Inc. – Republica Dominicana
Composición del Producto	Bolsa Recolectora de fluidos líquidos, elaborada en un plástico suave transparente (Five Ply Film), cubierta en su parte posterior por un refuerzo en EMA, sus bordes están sellados y está provista de un aro Sur-Fit Plus® flexible con ocho broches de contención. Está equipada con 5 válvulas antirreflujo y un sistema de válvula de vaciado.
Características y Acciones del Producto	<p>Protección de la Piel: La bolsa esta cubierta en su parte posterior por un panel poroso plástico que absorbe la humedad y aísla la piel del paciente evitando así irritaciones. Mantiene la piel seca y protegida.</p> <p>Bolsa Elaborada en Plástico resistente a fugas: Evita que los fluidos se filtren, y salgan los olores al exterior proporcionando así mayor Seguridad y comodidad al paciente.</p> <p>Ajuste perfecto: El aro Sur-Fit Plus® provisto de ocho broches de contención permite que se ajuste perfectamente al aro del mismo diámetro de las barreras Sur-Fit Plus® minimizando los riesgos de desacoples accidentales.</p> <p>Sistema de drenaje seguro: La bolsa está provista de una válvula de drenaje flexible que cierra a presión y es fácil de manejar por el paciente.</p>
Usos	Ostomías urinarias.
Recomendaciones de Uso	<p>Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none">• Elija la bolsa del mismo diámetro de la barrera protectora de piel Sur-Fit Plus®• Para acoplar la bolsa a la barrera, comience embonando los aros por los bordes inferiores. Asegúrese que queden bien embonados• Deje la bolsa con una pequeña cantidad de aire antes de acoplarla a la barrera para que pueda bajar libremente el efluente.• Si la bolsa se perfora por alguna razón deséchela y use una nueva• Verifique que la válvula de drenaje quede bien cerrada para evitar filtraciones• NO utilizar esta bolsa en recolección de efluentes sólidos.
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-0000028-R1 VIGENCIA: MARZO 10 DE 2021
Presentaciones:	Bolsas de urostomía drenables Medidas: Diámetros de 57mm – 45mm Caja x 10 unidades c/u



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
BOLSAS DE UROSTOMÍA SUR-FIT PLUS®**

Calificación de 1 a 5

5= Excelente

1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia a los Drenajes	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Drenaje de la Bolsa	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Seguridad del Ajuste de los Aros	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Seguridad del Sistema de Cierre	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Seguridad del sistema de válvulas antirreflujo.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Control del olor	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Protección de la Piel	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio Post-Venta: Asesoría educativa y Servicio al Cliente	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					