

Toujeo® SoloStar®

Seis sencillos pasos*

Paso


1

Revise su lápiz SoloStar®

Compruebe siempre el envase y la etiqueta para asegurar que

- ✓ No hay daños
- ✓ Es la insulina correcta
- ✓ La fecha de vencimiento está vigente
- ✓ Limpie el sello de goma, con un algodón con alcohol

No utilice el lápiz si la insulina se ve turbia, coloreada o contiene partículas

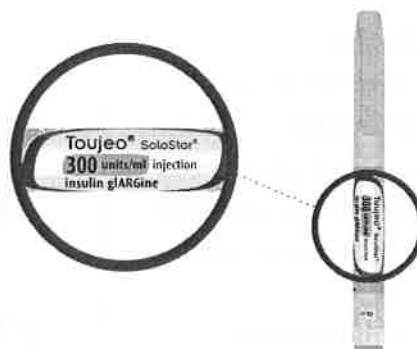


! Recuerde sacar su lápiz del refrigerador al menos una hora antes de su aplicación

Paso

2

Coloque una nueva aguja

- ✓ Utilice siempre una aguja nueva, esto ayuda a evitar la contaminación, infección y agujas obstruidas.
- ✓ Utilice siempre agujas de Becton Dickinson.

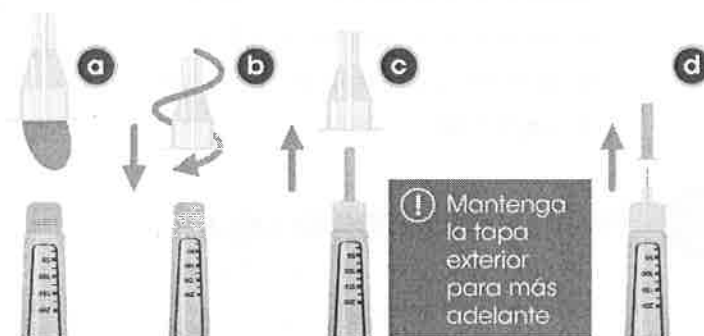


! Mantenga la tapa exterior para más adelante

Paso

3

Prueba de seguridad

- ✓ Realice siempre una prueba de seguridad antes de cada inyección para asegurar que su lápiz y la aguja están funcionando correctamente.
- ✓ Seleccionar y dispensar 3 unidades de insulina.
- ✓ Si no sale insulina por la punta de la aguja después de 3 intentos, cambie la aguja y repita la prueba.
- ✗ Nunca utilice una jeringa para extraer insulina del lápiz.

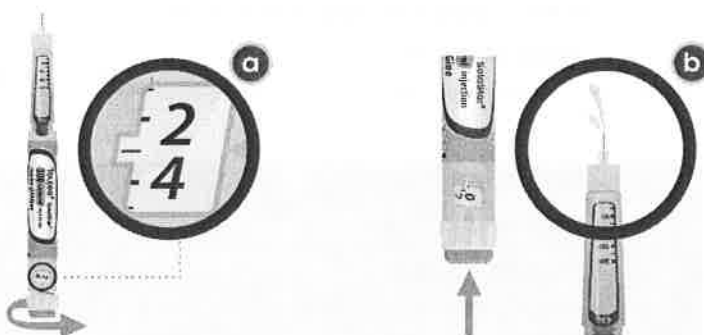


Paso

4

Seleccione la dosis

- ✓ Asegúrese que la aguja está acoplada y la dosis se ajusta a "0".
- ✓ Gire el selector de dosis hasta alinearlo con su dosis prevista.
- ✓ Si gira más allá el selector, puede regresarlo a su dosis.
- ✓ Si no puede seleccionar su dosis completa divida la dosis en 2 inyecciones o use un lápiz nuevo.

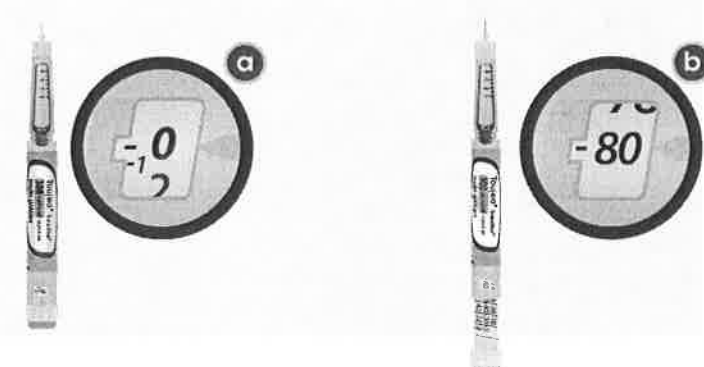


Toujeo® SoloStar®

Seis sencillos pasos*

Paso
5

Inyecte su dosis


- ✓ Inyecte Toujeo® SoloStar® en su estómago, brazos o muslos.
- ✓ Introduzca la aguja en la piel, como se lo ha indicado su médico ó enfermera.
- ✓ Presione hasta el fondo con el pulgar el botón de inyección.
- ✓ Mantenga el botón de inyección presionado hasta que vea en la ventana de dosificación "0". Cuente lentamente de 1 - 5 antes de retirar la aguja de su piel. Esto asegurará que recibe la dosis completa.

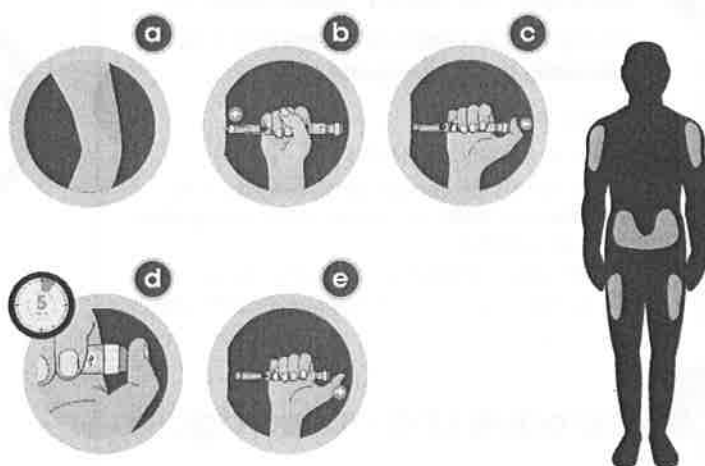

Paso
6

Retire y deseche la aguja

- ✓ Tenga cuidado al manipular agujas, para evitar lesiones e infecciones.
- ✓ Deseche la aguja usada en un recipiente resistente.
- ✓ Nunca coloque la tapa interior de la aguja de nuevo.

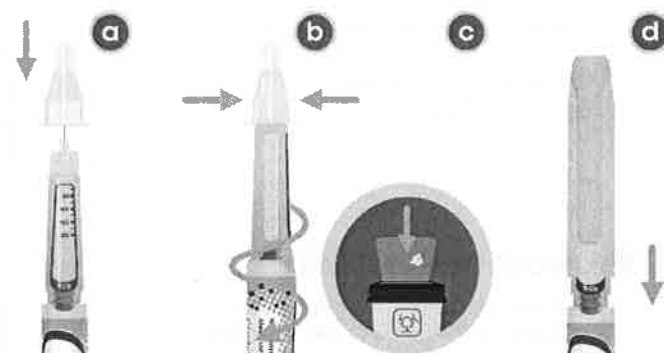

Recuerde

- ✓ Siempre retire su nuevo lápiz del refrigerador al menos una hora antes del primer uso, la insulina fría es más dolorosa al inyectar.
- ✓ Después del primer uso mantenga su lápiz a temperatura ambiente por debajo de 30° C hasta por 6 semanas y no vuelva a colocarlo en el refrigerador.
- ✓ Siempre lleve un lápiz y agujas de repuesto en caso que se pierdan o se dañen.
- ✓ Utilice siempre una aguja nueva cada vez que utilice el lápiz.
- ✗ Nunca comparta su lápiz con otra persona, está destinado sólo para usted.
- ✗ No intente retirar la insulina con una jeringa de su lápiz.

* Folleto de información al profesional Toujeo®.

Mayor información sobre Toujeo® SoloStar® ó completa para prescribir, disponible en el Departamento Médico de Sanofi: Teléfono 2 23667014

SCLGLA151010